

ANTIDEKUBITNI DUŠEK SA KOMPRESOROM – UPUTSTVO PROIZVOĐAČA

PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRE UPOTREBE

OPASNOST - Kako biste smanjili rizik od strujnog udara:

1. Uvek izvucite utikač iz utičnice nakon korišćenja.
2. Ne koristiti za vreme kupanja.
3. Ne stavljati i ne čuvati ovaj proizvod na mestima gde može upasti ili biti povučen u kadu ili umivaonik.
4. Ne stavljati proizvod u vodu ili druge tečnosti.
5. Ne pokušavajte da izvadite proizvod koji je upao u vodu iz nje. Odmah izvucite utikač.

UPOZORENJE - Kako biste smanjili rizik od opekotina, strujnog udara, požara ili povreda:

1. Ovaj proizvod nikada ne treba ostavljati bez nadzora dok je uključen u struju.
2. Nadzor je pogotovo neophodan u ako ovaj proizvod koriste deca ili osobe sa posebnim potrebama.
3. Koristite ovaj proizvod samo za predviđene namene in a način opisan u ovom priručniku. Ne koristite nastavke koji nisu preporučeni od strane proizvođača
4. Nikada ne koristite ovaj proizvod ako su mu kabl ili utikač oštećeni, ako ne radi ispravno ili ako je pao, ako je oštećen ili ako je pao u vodu. Vratite proizvod u servisni centar radi pregleda i popravke.
5. Držite kabl dalje od zagrejanih površina.
6. Nikada ne blokirajte otvore za vazduh na proizvodu i ne stavljajte ga na meke površine, kao što su krevet ili kauč, gde otvori mogu biti blokirani. U otvorima za vazduh ne sme biti vlasi, dlaka i ostalih čestica nečistoće.
7. Nikada ne ubacujte ili umećite bilo kakve predmete u bilo koji od otvora ili cevi.

NAPOMENA, OPREZ I UPOZORENJE:

NAPOMENA - Označava savete i preporuke.

OPREZ - Navodi kako ispravno postupati pri rukovanju ili održavanju proizvoda kako bi ste sprečili oštećenje ili uništenje opreme ili druge imovine

UPOZORENJE - Upozorava na potencijalnu opasnost koja zahteva pravilno postupanje kako bi se sprečile povrede.

SIMBOLI



Proizvođač



OPREZ koristi se kako bi se naglasila činjenica da postoje specifična upozorenja ili mere opreza u vezi sa uređajem



Pogledajte uputstva za rukovanje.



"BF" simbol, označava da ovaj proizvod spada u kategoriju BF opreme prema svom nivou zaštite od strujnog udara.



Oprema klase II.



Odlaganje električne i elektronske opreme (WEEE):

Ovaj proizvod treba predati na odgovarajućem mestu za sakupljanje električne i elektronske opreme za recikliranje. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu gradsku upravu, službu za odlaganje otpada ili prodajno mesto gde ste kupili ovaj proizvod.



SERIJSKI BROJ



"ON" (uključeno)



"OFF" (isključeno)

UVOD

Ovaj priručnik treba koristiti pri prvom podešavanju sistema i u referentne svrhe.

Osnovne informacije

Visoko kvalitetan i pristupačan sistem dušeka prikladan za lečenje i prevenciju dekubitusa.

Sistem je testiran i odobren prema sledećim standardima:



EN 60601-1: 2006 + A11: 2011
EN 60601-1-2: 2007

Namena

Ovaj proizvod je namenjen pomoći da pomogne i smanji pojavu dekubitusa i za postizanje optimalne udobnosti pacijenta. Uređaj je namenjen za sledeće:

Individualna kućna njega i dugotrajna njega osoba koje imaju dekubitus
Tretman bola u skladu s preporukama lekara



NAPOMENA - Oprema nije prikladna za upotrebu u prisustvu zapaljivih mešavina anestetika sa vazduhom, kiseonikom ili azotsuboksidom.

Garancija

Kompanija izdaje garanciju za pumpu u trenutku njene prvobitne kupovine i to na rok od dve godine.

Garancija ne pokriva sledeće:


1. Uređaje sa kojih je oznaka serijskog broja ili broja lota pumpe ili dušeka skinuta ili je neprepoznatljiva.
2. Oštećenja pumpe ili dušeka nastala usled pogrešnog povezivanja sa drugim uređajima.
3. Oštećenja uređaja nastala usled nezgode.

OPIS PROIZVODA

Pumpa

Prednja strana

1. Prekidač
2. Prednji panel

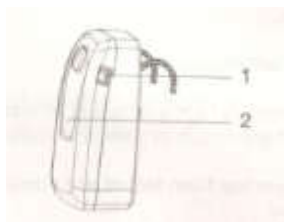

Zadnja strana

3. Priključak za crevo za vazduh
4. Vešalica
5. Električni kabl



Prednji panel

1. Dugme za podešavanje pritiska

Dugme za podešavanje pritiska kontroliše izlazni pritisak vazduha, okretanjem u smeru kazaljke na satu izlazni pritisak će se povećava. Okretanjem dugmeta u suprotnom smeru se smanjuje izlazni pritisak vazduha. Obratite se svom lekaru za odgovarajuće podešavanje.

2. Glavni prekidač


Za uključivanje / isključivanje pumpe.



INSTALACIJA

Raspakujte kutiju i proverite da li je došlo do oštećenja tokom transporta. U slučaju oštećenja odmah se obratite svom prodavcu.

Instalacija pumpe i dušeka

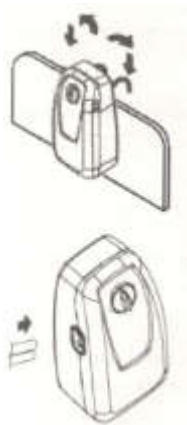

1. Okačite pumpu na podnožje kreveta i namestite vešalice kako bi pumpa bila u uspravnom položaju ili postavite pumpu na ravnu površinu.
2. Postavite dušek na postojeći dušek ili na krevet. Ako je potrebno, umetnite frotir ispod postojećeg dušeka.

⚠ NAPOMENA - Molimo vas da pokrijete dušek pamučnim prekrivačem kako biste izbegli direktan dodir kože i dušeka i osigurali udobnost pacijenta.

3. Spojite nastavak za crevo za vazduh dušeka sa pumpom.

⚠ NAPOMENA - Proverite i osigurajte da creva za vazduh nisu savijena ili uvučena ispod dušeka. Pokrijte dušek prekrivačem kako biste izbegli direktan kontakt kože i dušeka.

4. Ubacite utikač u utičnicu.

⚠ NAPOMENA

1. Proverite da li je pumpa adekvatna jačini napona struje na vašem području.
2. Utikač služi i za isključivanje uređaja.

⚠ UPOZORENJE - Pumpa se može koristiti samo sa dušekom preporučenim od strane proizvođača. Ne koristite je u druge svrhe.

5. Zatim stavite glavni prekidač koji se nalazi na desnoj strani pumpe u položaj ON.

U nastavku je navedeno nekoliko saveta za instalaciju:

Nakon instalacije, preostali deo električnog kabla treba uredno namestiti kako bi se izbeglo saplitanje. OPREMA treba biti sigurno postavljena na mesto kojem će korisnici/lekari imati neometani pristup.

RUKOVANJE



NAPOMENA - Uvek pročitajte uputstvo za rukovanje pre upotrebe.

Osnovna upotreba

1. Uključite pumpu glavnim prekidačem na desnoj strani pumpe.
2. Pumpa počinje da dovodi vazduh u dušek. Okrenite dugme za podešavanje udobnost u smeru kazaljke na satu kako biste povećali tvrdoću



NAPOMENA - Svaki put kada se dušek prvo puni vazduhom, preporučuje da dugme za pritisak bude podešeno na "Firm" (tvrdo) za najbrže punjenje vazduhom. Nakon toga korisnik može da prilagodi vazdušni dušek na željenu mekoću.

ČIŠĆENJE

Važno je pratiti uputstva za čišćenje pre korišćenja uređaja na ljudskim tijelima; u suprotnom, pacijenti i/ili lekari su u opasnosti od dobijanja infekcije.

Obrišite pumpu vlažnom krpom i blagim deterdžentom i čuvajte je od prašine. Ako koristite drugi deterdžent, odaberite onaj koji neće hemijski reagovati sa površinom plastičnog kućišta pumpe.

OPREZ - Ne uranjajte ili vlažite pumpu.

Obrišite dušek toplom vodom koja sadrži blagi deterdžent. Poklopac se takođe može očistiti pomoću natrijum-hipohlorita razređenog u vodi. Sve dijelove prije upotrebe temeljito osušite na zraku.

OPREZ - Za čišćenje ne koristite proizvod na bazi fenola.

OPREZ - Nakon čišćenja osušite dušek bez direktnog izlaganja sunčevoj svetlosti.

ODRŽAVANJE

Opšte

1. Proverite električni kabl i utikač kako biste utvrdili da li na njima ima ikakvih znakova havanja ili oštećenja.
2. Proveriti da li na dušek u ima znakova oštećenja. Proverite da li su dušek i crevo pravilno pričvršćeni.
3. Protok vazduha treba da se izmeni između svakog konektora svakog polu-ciklusa.
4. Proverite da li su creva za vazduh oštećena ili napukla. Za zamenu, molimo vas kontaktirajte naše lokalne distributere.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Predmet		Specifikacija
Napajanje (Napomena: videti oznaku na proizvodu)		AC 220-240 V, 50 Hz, 0.05A
Osigurač		T1A, 250 V
Dimenzije (DxŠxV)		26 x 12 x 9 cm
Trajanje ciklusa		6 min/60 Hz
Težina		1.2 Kg
Okruženje	Temperatura	Rad:10°C do 40°C (50°F to 104°F) Skladištenje: -15°C do 50°C (5°F to 122°F) Transport: -15°C do 70°C (5°F to 158°F)
	Vlažnost	Rad:10% do 90% bez kondenzacije Skladištenje:10% do 90% bez kondenzacije Transport: 10% do 90% bez kondenzacije
Dušek		Specifikacija
Model		Sa vazdušnim jastučićima
Dimenzije (D x Š x V)		200 x 90 x 6,5 cm
Težina		2,4 kg/ 5,3lb
Raspon pritiska (mmHg)		50 - 100



NAPOMENA:

1. Specifikacije su primenjive i na ostala područja koja rade na istom naponu.
2. Molimo vas da se pridržavate lokalnih propisa pri odlaganju uređaja na otpad.

www.mediquip.rs

061/634-14-84