

Antidekubitni dušek sa kompresorom

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Deset koraka do uspešnog montiranja:

1. Prilikom preuzimanja duseka proverite da li se u kutiji nalaze sledece stavke:
 - a. Dusek
 - b. Kompresor
 - c. Dva spojena creva
 - d. Garantni list
 - e. Dve flekice i lepak
2. Pre postavljanja duseka na lezaj proverite da nema ostrih predmeta na njemu ili federa koji bi mogli da izazovu busenje duseka.
3. Postavite dusek na lezaj, savijte proizvedene trake ispod duseka (TO SU PRODUZENI KRAJEVI SA OBE STRANE) da ne bi visile van lezaja.
4. Kada ste postavili dusek na lezaj povežite kompresor na dusek. Povezivanje se vrši tako što ćete spojiti dva gumena creva sa dusekom i kompresorom. Proverite da li je dobro postavljena guma i da nema pustanje vazduha.
5. Kada ste povezali dusek i kompresor, kompresor uključite u struju i podesite osigurac na srednju tvrdocu (KRUG KOJI SE OKRECE) i upalite kompresor na zeleno dugme.
6. Jako bitna stvar je da pacijent ne sme biti na duseku dok je proces punjenja.
7. Kada ste uključili dusek, kompresor će početi da puni komore duseka. Samo punjenje traje 10-15 minuta. Kada se napuni proverite da li dusek pusta negde vazduh i slobodno rukama pritisnite komore radi provere.
8. Nakon svih ovih koraka pacijent može da se spusti na dusek. Dusek prekriti posteljinom ali obratite pažnju da posteljina ne bude previše debela jer onda dusek neće imati efekta.
9. Podesavanje tvrdoće duseka pacijent sam određuje po potrebi. Određivanje tvrdoće se podesava na kompresoru okretanjem regulatora od MIN do MAX. Poželjno je da kompresor bude na dohvatu ruke pacijenta da može sam da kontrolise regulaciju
10. Nije poželjno da kompresor bude upaljen 24 casa. Poželjno je da se neko vreme ugasi radi hladjenja.

www.mediquip.rs

061/634-14-84