

UPUTSTVO ZA UPOTREBU (MIKROMOTOR)

STRONG 210 series



*Read all instructions before using



www.saeshin.com / sales@saeshin.com

OPIS PROIZVODA:

Mikromotor SAESHIN STRONG 210 je laboratorijski mikromotor sa karbonskim četkicama, namenjen za obradu plemenitih metala, keramike, akrilata, kompozicionih materijala... Primarna grana posla u kojoj se koristi mikromotor su kozmetika i stomatologija, ali se može koristiti i u drugim poslovima (rezbarenje i oblikovanje drveta, brušenje nakita itd).


Tehničke specifikacije:

- Brzina:
35,000 / 45,000 rpm
- Napajanje:
AC100V 50/60Hz
AC110/230V 50/60Hz
AC240V 50/60Hz
- ON/OFF pedala (kontrola uz pomoc stopala)
- Sposobnost okretanja: levo / desno
- Težina (kontrolna kutija): 1,3kg
- Dimenzije (mm): Š140, D132, V86





VAŽNE NAPOMENE:

Držite rastojanje izmedju ručice i burgije najmanje 2-3mm.

Pre zamene burgije, obavezno isključite aparat, jer se u suprotnom ručica aparata može oštetiti.

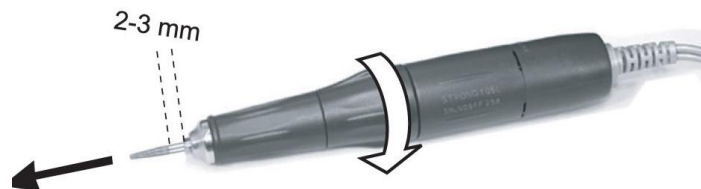

DELOVI MIKRO MOTORA

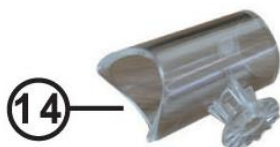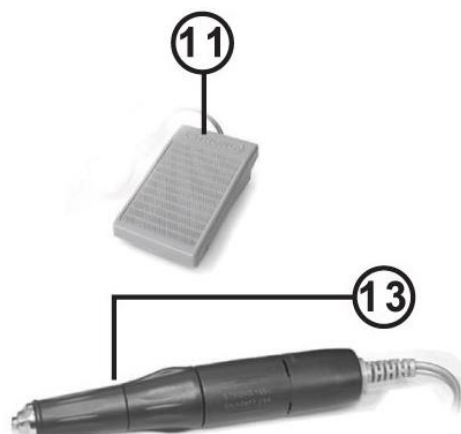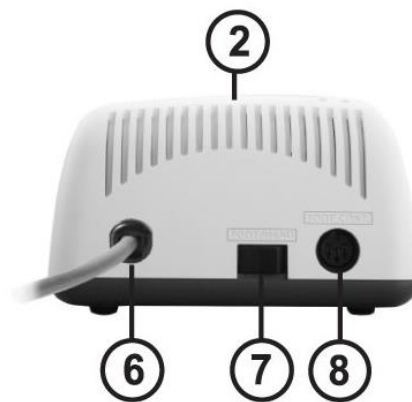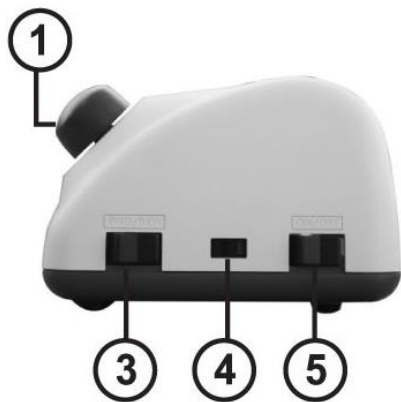

1. TOČKIĆ ZA KONTROLU BRZINE
2. KONTROLNA KUTIJA
3. PREKIDAČ (NAPRED-NAZAD)
4. PREKIDAČ ZA PROMENU NAPONA
5. PREKIDAČ ZA NAPAJANJE
6. KABL ZA NAPAJANJE
7. RUČNO – NOŽNI PREKIDAČ

8. KONEKTOR ZA NOŽNE PEDALE
9. DRŽAČ TURPIJE
10. LAMPA ZA UKLUČEN APARAT
11. NOŽNA PEDALA
12. KONEKTOR MOTORA
13. RUČICA ZA TURPIJU
14. DRŽAČ RUČICE

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE APARATA:

1. Pre upotrebe uređaja, uverite se da je PREKIDAČ ZA NAPAЈANJE (5) u položaju isključeno.
2. Povežite ručni deo sa (12) u kontrolnoj kutiji.
3. Postavite kabl za napajanje (6) u utičnicu.
4. Izaberite burgiju i otvorite steznu glavu okretanjem u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Stavite burgiju u otvorenu steznu glavu i ponovo ga zaključajte okretanjem u smeru kazaljke na satu.
5. Izaberite rotaciju pomoću prekidača (napred-nazad (3)). (F =u smeru kazaljke nasatu / R = suprtono od kazaljke na satu.
6. Sada koristite točkić za kontrolu brzine (1) i podesite potrebnu brzinu.
7. VAŽNO: kada promenite smer rotacije, bitno je da prvo isključite prekidač za napajanje (5).
8. VAŽNO: Pre zamene burgije, takođe je potrebno isključiti struju na prekidač za napajanje (5) ili postaviti točkić za kontrolu brzine (1) na „0“.
9. Dostupna je i nožna pedala.
Kada koristite nožnu pedalu, povežite je saodređenim konektorom za pedalu (8) na zadnjoj strani kontrolne kutije.
Prekidač za napajanje (5) mora biti u položaju „isključeno“. Sada možete podesiti željenu brzinu rotacije.
Nakon toga možete da koristite nožnu pedalu (11) da uključite i isključite napajanje po želji.

OBRATITE PAŽNJU NA SLEDEĆE!!!

- Proverite da li je jedinica pravilno priključena u utičnicu!
- Proverite da li je ručna jedinica pravilno priključena sa kontrolnom kutijom!
- Proverite da li je prekidač za napajanje u položaju „ON“!
- Ako neki od ovih problema i dalje postoji kontaktirajte vašeg ovlašćenog servisera Ticaret – MLZ 1987 DOO ili kontaktirajte firmu Saeshin Precision Co., Ltd.

ODRŽAVANJE:

- Održavajte unutrašnje delove ručne jedinice redovnim čišćenjem kako bi ste izbegli kvarenje zbog prašine i ostatka prljavštine koja tu dospe usled rada.
- Koristite alkohol za dezinfekciju kako bi ste uklonili svu prljavštinu i prašinu sa spoljanje strane jedinice i izbegli bilo kakvu vlagu iznutra.
- Koristite samo turpije koje su namenjene i koje su u skladu sa standardnom veličinom od 2,35mm i izbegavajte korišćenje zardalih ili oštećenih turpija za turpisanje.
Ako se ne pridržavate ovih pravila može doći do prevremenog habanja ležajeva. Sledite bezbednost procedure proizvođača i držite se naznačene bezbedne brzine.
- Ne izlažite ručnu jedinicu jakim udarcima, jer to može oštetiti istu.
Ako vam ručna jedinica ispadne, proverite da li je burgija za turpisanje uvrnuta ili oštećena.
- Ne izlažite aparat na mokro i vlažno mesto.
- Takođe nemojte aparat dovoditi u direktan kontakt sa vatrom, gasom, kiseonikom ili vrućim predmetima kao što su ploče za kuvanje itd.

PRILIKOM RADA APARATOM, POTREBNO JE SLEDEĆE:

- 1) Ručna i nožna pedala se smeju koristiti samo sa jedinicom sa kojom su isporučene.
- 2) Odgovarajući delovi za korišćenje:
 - standardna veličina 2,35 mm
 - koristite samo odgovarajuće nastavke za turpisanje sa zaboljenim krajem osovine
 - ne smete koristiti zardale, uvrnute ili oštećene delove za turpisanje.
- 3) Pažljivo koristite kontrolu brzine rotacije.
- 4) Kada odlažete aparat, ručicu morate staviti na njen držač.

***Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane dece i od strane osoba sa smanjenim fizičkim , čulnim ili mentalnim smetnjama ili nedstatkom iskustva zanja, osim ako im je dat nadzor ili uputstva o upotrebi uređaja od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost!**

***Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa uređajem!**

INFORMACIJE I GARANCIJI:

Garantni rok: **1. godina.**

Garancija ne uključuje pogrešnu upotrebu ili normalno habanje ležaja, ugljene četkice, stezne glave, vretena i armature koje se tokom korišćenja potroše!



Ova oznaka prikazana na proizvodu ili njegovoj literaturi, ukazuje na to da ga ne treba odlagati sa drugim otpadom na kraju njegovog radnog veka. Da biste sprečili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usled nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo vas da ga odvojite od drugih vrsta otpada i da ga odgovorno recikirate kako biste promovisali održivo ponovno korišćenje materijalnih resursa.

Transport and storage conditions:
Temperature : 10 ~ 40°C
Humidity : 30 ~ 75% RH
Atmospheric Pressure : 700 hPa to 1060 hPa



SAESHIN PRECISION CO.,LTD.
HEAD OFFICE & FACTORY
93-15,PAHO-DONG
DALSEO-GU,KOREA
Tel. 82-53-587-2340 / 2341
Fax. 82-53-587-2347



EU representative
Dongbang Acuprime
Gater House,Gater Lane,Palace Gate,
Exeter,EX 1 1JL. United Kingdom
Tel. 44-1392-273908 Fax.44-1392-273909

SOM L041S E Rev.0 2010 .03.

www.saeshin.com / sales@saeshin.com



SAESHIN

100% ORIGINAL



Sajt firme TICARET – MLZ 1987 DOO:

- www.mediquip.rs (sajt za poručivanje robe)
- www.medicinskaopremapancevo.com

Adresa firme: Cara Lazara 3, Pančevo

PIB: 111370029

Kontakt telefon: +381 613094791

GARANTNI LIST I SERVISNI LIST ZA KRAJNJEG KORISNIKA

<i>Kupac</i>	
<i>Adresa</i>	
<i>Telefon</i>	
<i>Proizvod, model</i>	SAESHIN MICROMOTOR STRONG 210
<i>Serijski broj</i>	
<i>Datum kupovine/iskoruke</i>	
<i>Potpis I pečat</i>	

SERVISNI KUPON 1

<i>Datum</i>	
<i>Opis posla</i>	
<i>Potpis I pečat</i>	

